 <p style="text-align: center;">FICHA TÉCNICA</p>	Versão: <p style="text-align: center;">1</p>
Produto: FILME TRANSPARENTE CREMER ADVANCED COM COMPRESSA	Cadastro ANVISA: 80245210091

Indicação: Filme transparente com compressa é indicado como cobertura primária ou secundária, em feridas de leve a moderada exsudação e também como proteção mecânica em pele íntegra.

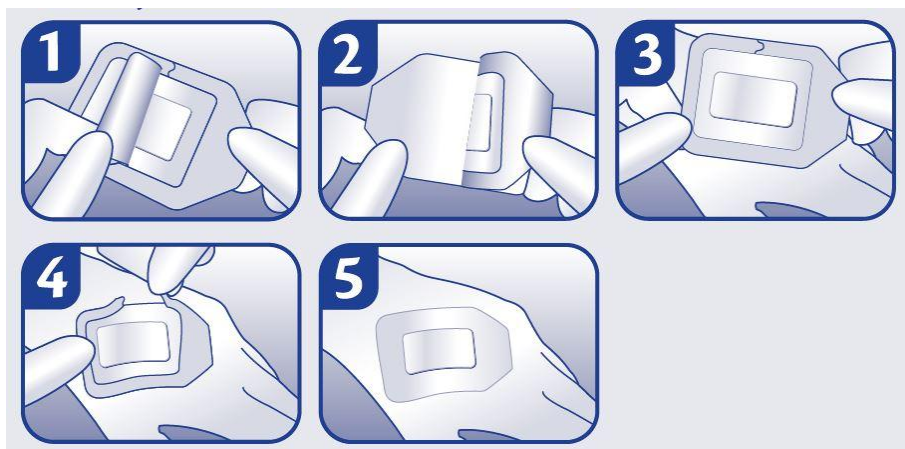
Especificação do Produto: O Filme transparente com compressa absorvente é um curativo adesivo de filme de poliuretano, coberto com adesivo hipoalérgico e almofada não aderente à base de viscosa. Durante o tratamento, o curativo age absorvendo exsudato do ferimento em sua almofada não aderente. Sua película de poliuretano possui características de permeabilidade seletiva, permitindo trocas gasosas e age como barreira contra água e micro-organismos.

Foto Ilustrativa:



Modo de usar:

- 1 – Prepare o local de aplicação do produto, realizando desbridamento, tricotomia e limpeza, conforme instruções do protocolo da instituição;
- 2 – Escolha o tamanho adequado para o procedimento a ser realizado;
- 3 – Abra cuidadosamente a embalagem estéril;
- 4 – Remova a película protetora sobre o visor do curativo;
- 5 – Remova a película protetora da face adesiva do curativo;
- 6 – Aplique o curativo sobre o local desejado, fazendo visualização por meio do visor, certifique-se de não estar esticando o curativo durante a aplicação;
- 7 – Faça a remoção da última película protetora sobre a face adesiva do curativo;
- 8 – Remova as bordas do curativo, fazendo leve pressão do centro às bordas do curativo, a fim de garantir total fixação do mesmo.


Principais Características:

- Excelente fixação;
- Transparente;
- Permeabilidade seletiva;
- Sistema de fácil aplicação;
- Textura suave;
- Protege a pele;
- Com compressa absorvente não aderente;
- Livre de látex;
- Estéril por ETO.

Precauções e Advertências:

- Manter em local seco e fresco;
- Manter ao abrigo do sol;
- Verificar data de validade antes da utilização;
- Verifique a integridade da embalagem antes de utilizar o produto;
- Este produto deve ser utilizado sob prescrição e supervisão de um profissional da saúde habilitado;
- Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica;
- Produto de uso único, destruir após o uso.

Disponível nas Apresentações:

Código	Descrição	Apresentação
375237	Filme Transparente com Compressa Cremer Advanced 6cmX7cm	Caixa com 6 cartuchos, com 100 unidades
375244	Filme Transparente com Compressa Cremer Advanced 10cmX10cm	Caixa com 6 cartuchos, com 20 unidades
375251	Filme Transparente com Compressa Cremer Advanced 10cmX15cm	Caixa com 6 cartuchos, com 20 unidades

Responsável Técnico:

Fernanda Fortes de Oliveira
CRF/SC nº 13.686