 <p style="text-align: center;"><b>FICHA TÉCNICA</b></p>	<p><b>Versão:</b></p> <p style="text-align: center;">1</p>
<p><b>Produto: FILME FENESTRADO INVENA FIX CREMER ADVANCED</b></p>	<p><b>Cadastro ANVISA:</b> <b>80245210167</b></p>

**Indicação:** Filme fenestrado Invena Fix é indicado para fixações de cateteres intravenosos (IV), centrais e periféricos, para proteção do sítio de inserção e prevenção de infecção por contaminações externas.


**Especificação do Produto:** Filme fenestrado Invena Fix é um curativo de filme de poliuretano e não tecido de viscosa, recoberto com adesivo acrílico hipoalergênico, acompanha fitas auxiliares autoadesivas à base de fibras de celulose e não tecido de viscosa, recobertas com adesivo acrílico hipoalergênico.


**Foto Ilustrativa:**



**Modo de usar:**

- 1 – Após realização da punção, abra cuidadosamente a embalagem estéril do curativo.
- 2 – Retire o papel de proteção nº 1, expondo a face adesiva do curativo;
- 3 – Aplique o curativo no local da inserção, alinhando as conexões da inserção com a janela do curativo. Certifique-se de que o ponto de inserção do cateter fique totalmente sob o filme;
- 4 – Remova cuidadosamente o papel de proteção nº 2, fixando a extremidade do curativo;
- 5 – Remova os papéis de proteção das janelas nº 3, finalizando a fixação do curativo;
- 6 – Remova o filme de proteção do dorso, alisando o curativo em direção às bordas para garantia de fixação;
- 7 – Utilize as fitas auxiliares, fixadas no papel de proteção nº 2, para garantir estabilidade do cateter e identificar o paciente e data do curativo. Recomenda-se executar as anotações na fita de identificação antes da aplicação no paciente.

 <p style="text-align: center;"><b>FICHA TÉCNICA</b></p>	<b>Versão:</b> <p style="text-align: center;">1</p>
<b>Produto: FILME FENESTRADO INVENA FIX CREMER ADVANCED</b>	<b>Cadastro ANVISA:</b> <b>80245210167</b>

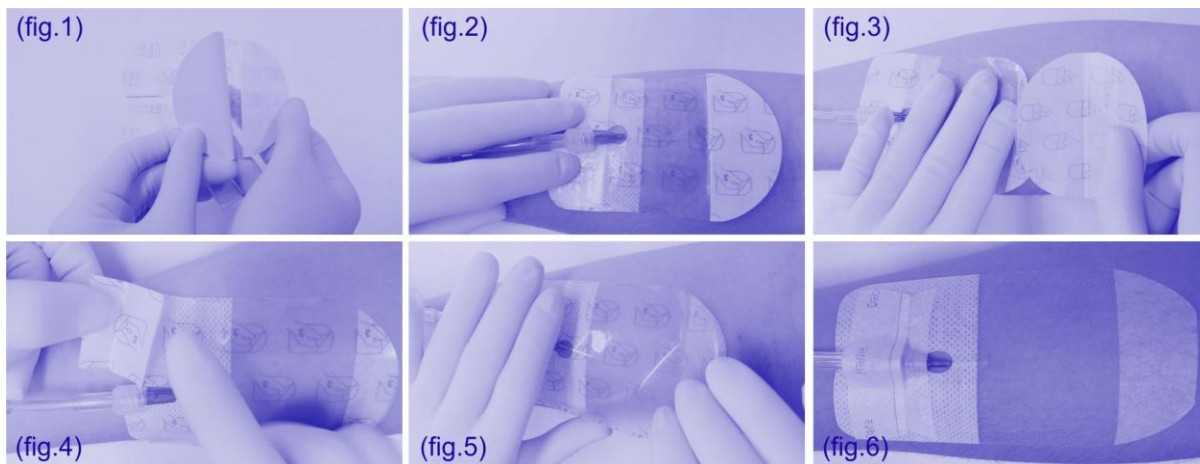

**Principais Características:**

- Permite visualização do sítio da inserção;
- Protege contra infecções;
- Textura suave;
- Conta com fitas auxiliares para melhor fixação;
- Fácil aplicação (passo a passo indicativo);
- Permeabilidade seletiva;
- Fixa cateteres vasculares;
- Conta com fita para identificação do paciente;
- Partes destacáveis e fitas autoadesivas que garantem estabilidade ao dispositivo fixado;
- Estéril por ETO.

**Precauções e Advertências:**

- Verificar integridade da embalagem antes da utilização;
- Manter em local seco e fresco;
- Manter ao abrigo do sol;
- Verificar data de validade antes da utilização;
- Não usar o produto sobre feridas ou lesões;
- Este produto deve ter a prescrição e supervisão de um profissional de saúde habilitado;
- Em caso de sangramento no local de inserção do cateter, faz-se necessário hemostasia antes da aplicação do curativo;
- Não tencione o curativo durante a aplicação e não utilize o curativo se ele estiver tensionado.

**Disponível nas Apresentações:**

Código	Descrição	Apresentação
584394	Filme Fenestrado Invena Fix Cremer Advanced 7cmX9cm	Caixa com 6 cartuchos, contendo 50 unidades
584400	Filme Fenestrado Invena Fix Cremer Advanced 9cmX12cm	Caixa com 6 cartuchos, contendo 50 unidades

**Responsável Técnico:**

Fernanda Fortes de Oliveira  
 CRF/SC nº 13.686